









Probówko-strzykawki Monovette® do gazometrii



Probówko-strzykawki Monovette® do gazometrii krwi. Dzięki zastosowaniu heparyny zrównoważonej jonami Ca²⁺ nadają się również do oznaczania w próbce elektrolitów. Przystosowane do pracy w połączeniu z igłami, adapterami i cewnikami ze złączem Luer.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6212	Probówko-strzykawki Monovette® do gazometrii	bez etykiety	1,0 ml	11 x 66 mm	pudełko	50 szt.	05-1146
	J-6214	Probówko-strzykawki Monovette® do gazometrii	bez etykiety	1,0 ml	11 x 66 mm	pak. ind.	100 szt.	05-1146-020
	J-6216	Probówko-strzykawki Monovette® do gazometrii	bez etykiety	2,0 ml	11 x 66 mm	pudełko	50 szt.	05-1147
	J-6218	Probówko-strzykawki Monovette® do gazometrii	bez etykiety	2,0 ml	11 x 66 mm	pak. ind.	100 szt.	05-1147-020
	J-6222	Probówko-strzykawki Monovette® do gazometrii z adapterem membranowym	bez etykiety	2,0 ml	11 x 66 mm	pak. ind.	100 szt.	05-1147-028
	J-6224	Probówko-strzykawki Monovette® do gazometrii z filtrem	bez etykiety	2,0 ml	11 x 66 mm	pak. ind.	100 szt.	05-1147-048

Opis

Probówko-strzykawki Monovette® do gazometrii przeznaczone do pobierania próbek krwi, zarówno tętniczej, jak i w rzadkich przypadkach żylnych. Składają się z plastikowego naczynia z tłokiem zakończonym męskim złączem Luer oraz z pomarańczowej nasadki z tworzywa sztucznego. Wewnątrz umieszczono preparat heparyny o zrównoważonym stężeniu jonów wapnia Ca²⁺ (50 j.m. heparyny/ml krwi, rozpylony w postaci kropeł). Pobrane próbki służą do przeprowadzenia analiz gazometrii, podczas których wyznacza parametry takie jak pH krwi i poziomy elektrolitów. Dają możliwość, przy użyciu analizatorów, natychmiastowego przeprowadzenia analizy gazometrii krwi w miejscu opieki nad pacjentem (POCT). Dzięki temu wyniki mogą być dostępne niemal natychmiast, co pozwala na błyskawiczne podejmowanie decyzji klinicznych. Za pomocą Monovette® do gazometrii **nie można oznaczać zawartości litu.**

Oferowane produkty wysterylizowano przez napromieniowanie elektronowe. Posiadają certyfikat CE oraz IVD (wyroby medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Nakładki odpowietrzające i adaptery membranowe to akcesoria, które są dostępne osobno lub mogą być dołączone w zestawie z probówko-strzykawkami Monovette® do gazometrii. **Nakładka odpowietrzająca** z filtrem minimalizuje obecność

powietrza w procesie pobierania próbki krwi. Poprawia to dokładność analizy. Zestaw z **adapterem membranowym** umożliwia pobranie próbek strzykawką z przyłączem Luer przy użyciu igieł z zamontowanym Multi-Adapterem ([S-Monovette®](#) i [Multify®](#)).