




Końcówki transferujące do V-Monovette[®]



Końcówki transferujące pozwalające na przenoszenie moczu z pojemników zbiorczych do probówek V-Monovette[®] z wykorzystaniem techniki próżniowej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6164	Końcówki transferujące do V-Monovette [®]	50 szt.	11-1240

Opis

Przyrząd do przenoszenia moczu do V-Monovette[®] Urine z pojemnika na próbki. Probówki V-Monovette[®] można trzymać w dowolnej pozycji, gdyż system wykorzystuje technikę próżniową. Rurkę należy umieścić w pojemniku z płynem, po czym żółtą plastikową końcówkę założyć na probówce wbijając w nią umieszczone wewnątrz tej końcówki ostrze. Długość rurki wynosi 10 cm. Skrzydełka na obrzeżach końcówki umożliwiają obsługę jedną ręką. Końcówki transferujące posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Kompatybilne z probówkami [V-Monovette[®] Urine Neutral](#) oraz [V-Monovette[®] Urine Boric Acid](#).