




Probówki Salivette[®] z wacikiem bawełnianym



Probówki Salivette[®] są przeznaczone do higienicznego pobierania próbek śliny w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Wyposażone w wacik bawełniany bez preparacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. probówki (śr. x dł.)	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5991	Probówki stożkowodenne Salivette [®]	16,8 x 84 mm	niesterylne	100 szt.	51-1534

Opis

Probówki Salivette[®] są przeznaczone do higienicznego pobierania próbek śliny w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Wyposażone w wacik bawełniany bez preparacji. Probówki z wykonane z PP z białą zatyczką wykonaną z LDPE.

Aby pobrać próbkę śliny należy otworzyć probówkę Salivette[®], następnie umieścić wymazówkę na 45 s w jamie ustnej pacjenta. Namoczony wacik należy z powrotem przenieść do probówki. Wirowanie umożliwia przeniesienie próbki śliny z wacika do probówki stożkowodennej. Zalecane parametry wirowania Salivette[®] to 1000 x g przez 2 min w temperaturze 20°C. Standardowa objętość uzyskiwanej próbki to 0,8-1,4 ml.

Produkt posiada certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).