




## Probówki Salivette® VD z wacikiem bawełnianym



Probówki Salivette® VD firmy Sarstedt są przeznaczone do łatwego i higienicznego pobierania próbek śliny. Wyposażone w wacik bawełniany z preparacją dedykowaną do diagnostyki w kierunku wirusów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. probówki (śr. x dł.)	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5995	Probówki stożkowodenne Salivette® VD	16,8 x 84 mm	niesterylne	100 szt.	51-1534-100

### Opis

Probówki Salivette® VD są przeznaczone do higienicznego pobierania próbek śliny do diagnostyki w kierunku wirusów. Wyposażone w wacik bawełniany z preparatem z kwasem cytrynowym. Probówki z wykonane z PP z jasnoniebieską zatyczką wykonaną z LDPE.

Pobieranie próbki za pomocą Salivette® VD polega na umieszczeniu wymazówki na 45 s w jamie ustnej pacjenta. Namoczony wacik należy umieścić z powrotem w probówce Salivette® VD. Wirowanie umożliwia przeniesienie próbki śliny z wacika do probówki stożkowodennej. Zalecane parametry wirowania Salivette® VD to 500 x g przez 1 min w temperaturze 20°C. Standardowa objętość uzyskiwanej próbki to 0,8-1,4 ml.

Produkt posiada certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).